

體重計

BS-185

家庭用

使用說明書/保用証

感謝您購買我們的產品。使用前，請務必完整閱讀本使用說明書，以確保正確、安全使用。閱讀完本手冊後，請將其妥善保管，以便您隨時查閱。

- ＜保用條款＞
- 在保用期內，如果按照使用說明書等的說明正常使用產品時發生故障，請攜帶本說明書到購買商店出示。我們將免費維修和調整。
 - 下列情況下，即使在保用期內，也將需要付維修費。
 - *因不正確使用、不小心跌倒、自行維修、拆解、改裝、因天災、地震、異常電壓等外在因素造成的故障或損壞。
 - *因不正確使用而導致的外觀變化。
 - *如果保用証中沒有列出商店或購買日期，或比修改重寫。
 - *如果沒有提供這保用証。
 - *用於一般家庭用途以外的用途（例如商業用途等）時造成的故障和損壞。
 - 電池不在保用範圍內。
 - 維修費包括，客戶負責支付維修產品的運費、維修配件費和技術費。
 - 本保用証根據本文檔中指定的條款和條件進行免費維修。本保用証客戶對簽發保用証的人和其他經營者俱有法律約束力。這並不限制的權利。
 - 保用証不會補發，因此請妥善保管，以免遺失。
 - 對於因不遵守安全預防措施而造成的任何損壞，我們不承擔任何責任。

＜保用証＞

我們根據本保證書的內容對本產品進行保證。如需維修本產品，請攜帶並出示此保用証並諮詢您的購買商店。

產品編號	BS-185
保用期	自購買日起1年
購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名 地址 電話號碼
經銷商	名稱 訂單號碼

使用您個人資訊的目的

請注意，客戶撰寫的保用証副本可用於保用期內的服務活動以及後續的安全檢查活動。此外，除法律要求，未經您事先同意，我們不會將您的資訊用於上述目的以外的用途。

安全注意事項

使用前請先仔細閱讀《安全注意事項》，正確使用產品。所有標有以下警告標誌的項目均與安全有關。請務必遵守這些注意事項。

禁止	不可做的事項
指示	注意事項

警告

可能導致人員死亡或嚴重受傷的內容

禁止

- 切勿拆卸、修理或改造本產品。這樣做可能會造成傷害。
- 請勿在潮濕的地板或瓷磚等光滑表面上使用。
- 沐浴後等身體或腳部潮濕時請勿使用。有跌倒或滑倒並造成嚴重傷害的風險。
- 請勿跳到主機上、請勿跳到主機頂端或靠在主機邊緣。
- 測量台很滑，請小心，慢慢踩。有跌倒和嚴重受傷的風險。
- 請置於兒童接觸不到的地方。有意外攝入或受傷的可能性。
- 請勿根據測量結果採取減肥或運動療法。自我判斷可能會損害您的健康，因此請務必遵循醫生或專家的指示。
- 請勿將重物摔在主機上、與硬物碰撞或使主機掉落。雖然使用了強化玻璃，但玻璃可能會破裂、碎片飛散，導致事故或受傷。另外，即使當時沒有破裂，也可能會因為刮痕而在意想不到的時候破裂。如果被刮傷，請停止使用。

注意事項

可能導致人身傷害或財產損失的內容

禁止

- 請勿用於商業用途（醫院、診所等）。本產品適合家庭使用。它不具有任何商業功能。
- 請勿將手指插入主機周圍的縫隙中。有受傷的危險。
- 本產品不防水、防滴，請勿在潮濕的地方存放或使用。
- 請勿將產品倒置或在測量台上放置任何物品。否則可能會導致故障。
- 請勿放置在陽光直射或高溫的地方。否則可能會導致火災、損壞或故障。

指示

- 如果身體殘障人士使用本產品，需要護理人員協助

關於電池

- 請勿拆卸或加熱。請勿將其投入火中。
- 如果電池液接觸到皮膚或衣服，請用清水清洗。如果進入眼睛，請立即用清水沖洗並立即就醫。
- 請將電池放在兒童接觸不到的地方。如果吞嚥，請立即就醫。
- 以正確的極性（+/-）插入電池。
- 電池電量耗盡或長期不使用時請將其取出。
- 廢棄電池時，請遵循地方政府的指示。
- 請勿混用新舊電池。
- 請勿混合使用不同類型或製造商的電池。
- 若在使用或存放過程中發現電池出現發熱、變形等異常情況，請停止使用。

稱重精度

本產品依照計量法規定的技術標準進行製造和檢驗。使用時，我們保證測量重量的精度在以下範圍內。

（使用地點溫度：23±5℃，濕度：50±20%）


測量	準確性
5～75kg 以下	±0.2kg
75kg 以上 100kg 以下	±0.3kg
100kg 以上 150kg 以下	±0.6kg

- *無法測量5公斤以下的物品。
- *各地區的重力值略有差異。由於這種影響，高精度秤可能會出現誤差。

為了保持準確性

該產品是精密製造的。為了保持其良好狀態，請仔細遵守以下事項。

- 請勿將本產品放置在陽光直射或加熱器熱風的地方。
- 避免在溫度變化劇烈的場所使用。
- 請勿在特別潮濕或潮濕的地方使用或存放本產品。
- 請勿存放在有強烈震動的地方。
- 請勿將產品斜靠在其上或在其上方放置任何物品存放。

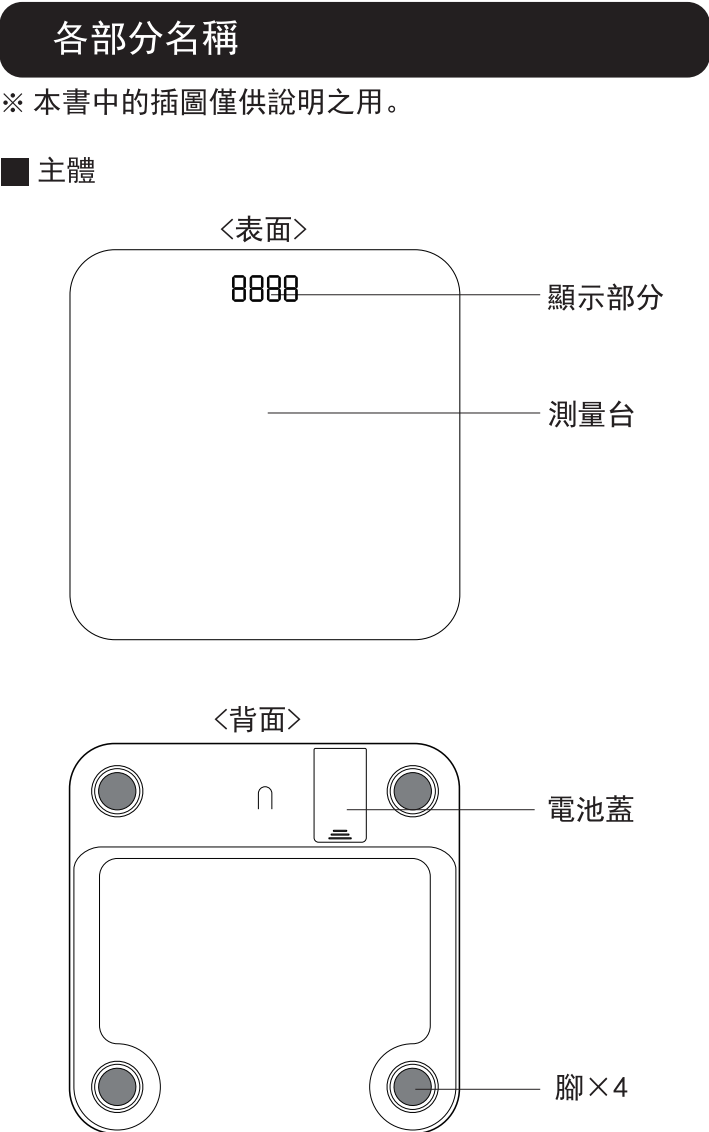

第一次使用前

顯示幕上貼有保護膜以保護螢幕，因此請在使用前將其取下。

調零

●什麼是調零？
本產品具有調零功能。調零是讓設備辨識設備上沒有任何東西為 0.0kg的設定。本產品定期進行歸零，但安裝電池、移動主機或 改變其放置位置時可能會出現錯誤，因此請務必按照以下步驟進行「手動歸零」。

- 手動歸零方式
- ① 將本產品安裝在平坦的硬地板上。
 - ② 將腳踩在測量台上，當顯示幕上出現「8888」時，將腳移開。
- 顯示為 “0.0kg”。至此調零完成。

如何使用



指示

確保將其安裝在平坦、堅硬的地板上。
無法在榻榻米墊、地毯或傾斜地板上進行準確測量。

- ① 安靜地站在測量台上。電源自動打開並開始測量。
 - ② 一旦測量值被確認，顯示將固定並閃爍3次。
 - ③ 輕輕離開測量台。
- ※測量值顯示將固定約15秒，然後電源將自動關閉。（自動關閉電源）
- ※如果由於身體不穩定等原因導致數值不穩定，則測量值可能不正確。
它不會鎖定到位，並且會在大約 15 秒後關閉。

顯示方式



電量消耗顯示


當電池電量不足時，將其放在測量台上，顯示器上會顯示 “Lo”，並且電源會自動關閉。請更換兩顆新電池。



更換電池

附帶的電池用於確認操作，因此電池壽命可能較短或電池電量可能不足。

- ① 滑動並取下電池蓋。
- ② 取出舊電池並安裝新電池。（圖3）
※請務必以正確的極性（+/-）插入電池。
- ③ 將突出部分與孔對齊並滑動以關閉。（圖4）

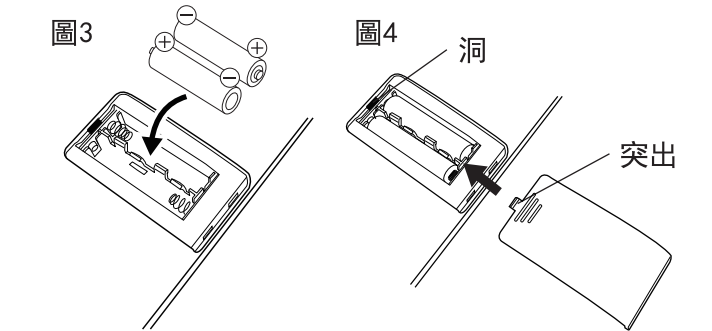

如何護理

- 用濕布擦掉主機上的污垢。
如果污垢較重，可用布沾少量中性廚房清潔劑擦拭。
- 切勿用水清洗。否則可能會導致故障。
- 請勿使用沸水、酒精、稀釋劑、汽油等。否則可能會導致變色、變形或損壞。

如果你覺得有問題

- 電源打不開**
 - 電池是否已耗盡？
 - 電池極性（+/-）是否正確？
 - 絕緣片是否已拆除？
- 顯示 “Lo”。**
 - 電池電量耗盡。請更換兩顆新電池。
- 測量結束後，顯示「C」。**
這是重量自動調整為0.0kg的通知。
※如果直立或傾斜存放，測量值可能會出現誤差。此時，確認測量值並離開測量平台後，將顯示 “C”，測量值將自動調整為 0.0kg。請關閉電源並重試。

- 顯示的測量值明顯不同。**
 - 進行「調零」。（請參閱第 5 頁「調零」）
 - 您是否在榻榻米或地毯等柔軟的地板上進行測量？將產品放置在平坦、堅硬、穩定的地板上，進行“調零”，然後再次嘗試測量。
 - 在高溫或低溫下無法進行正確的測量。
 - 無法測量5kg以下的物品。
※如果因測量不穩定等原因導致您的體重低於5公斤，則會自動調整並顯示為0.0公斤。約15秒後，0.0kg顯示將消失。
 - 重量超過150kg時無法進行測量。可能會出現錯誤訊息 “Err”。

關於售後服務

如果您對維修或處理有任何疑問，請先聯絡您購買產品的商店。

- 1. **需要維修時**
 - 如果檢查「故障排除」部分後問題仍然存在，請停止使用該產品並要求維修。
 - 在保用期內，請攜帶保用証到購買產品的商店要求維修。我們將根據保用期內容對產品進行維修。請注意，除產品維修外，我們不承擔任何責任。如果已過保用期，請聯絡您購買產品的商店。如果產品修復後可以使用，我們將根據要求進行有償維修。

- 2. **如果您對售後服務有任何疑問**
 - 請聯絡您購買產品的商店或進口商和分銷商。

進口商和分銷商: GALAXY COMMUNICATION LIMITED
客戶服務熱線(可whatsapp) +852 53968268
營業時間: 星期一至五10:00至17:30
(午膳時間為: 13:30-15:00)
服務中心: 荔枝角長義街10號 昌隆工業大廈2樓B2室

規格

產品名稱	體重計
產品編號	BS-185
尺寸	大約寬260×深260×高24mm
重量	約980公克（不含電池）
試重範圍	5~150公斤
最小誤差	5kg以上100kg以下: 0.1kg
	100 kg以上150 kg以下: 0.2 kg
使用的電池	AAA 電池 x 2
電池壽命	約 1 年（如果每天測量 3 次）
自動關閉電源	約15秒

※ 請注意，產品規格如有更改，恕不另行通知。

操作手冊

初始啟動

- 插入電池
- 打開體重計背面的電池門。
- 依照電池盒內標示的極性指示將電池（2 x 1.5V AAA）插入電池盒中。
- 關閉電池門。

警告

當出現“Lo”符號時，設備將關閉。
然後您應該更換一組新電池。請同時更換所有兩顆電池。請勿將舊電池與新電池 混用。
廢棄電池屬於危險廢棄物。請勿將其與生活垃圾一起處理。
請參閱有關廢棄電池處置的當地法令和回收說明。
為了獲得最佳性能並保護您的體重秤，請使用授權/指定的電池。

初始使用的體重秤

- 1. 按下平台中心並移開腳。
- 2. LED 上會顯示數字“8888”，然後顯示“0.0 kg”。
如果秤移動，則必須重複此初始化過程。
請直接站在體重計上。

開始測量

- 1. 將體重計平放在堅硬的表面上。
- 2. 踏上測量台並保持靜止，直到重量穩定。重量已鎖定。
- 3. 輕輕離開測量台
- 4. 約15秒後將關閉。

※ 如果身體不穩定，測量值就無法固定。