

# 鼻用洗浄器

クリーンリフレッシュ

280 ml  
タンク容量  
280ml

ノズルが  
360°回転

替え  
ノズル付

USB  
充電式

## 製品特徴

鼻の奥まで  
しっかり洗浄

選べる3つの  
洗浄モード

ボタンを押すだけ  
かんたん操作


シリコンヘッドで  
鼻にやさしい

## 使い方

### 洗浄水を作る

精製水 280ml

精製塩約2.5g

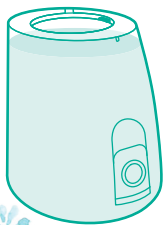

+



### モードを選択

normal

○ … 強い水流でしっかり洗浄

soft

○ … 柔らかい水流で  
初心者や子供におすすめ

pulse

○ … 水に脈動を与えながら洗浄

### 鼻腔を洗浄

洗浄中にも  
モード変更  
可能



販売名 鼻用洗浄器HK-200  
一般的名称 鼻用洗浄器  
品番 HK-200  
医療機器区分 一般医療機器  
医療機器届出番号 11B2X10023000003  
入力 DC5V 1A

内蔵電池 充電式リチウムイオン電池 3.7V 1400mAh

充電時間 約4時間(空の状態から満充電まで)  
寸法 約幅72×奥行85×高さ218mm  
質量 約245g(本体+タンク)  
流量 normal : 130±30ml/30秒  
soft : 90±30ml/30秒  
pulse : 100±30ml/30秒  
タンク容量 約280ml

使用環境温湿度 温度: 5~40℃  
湿度: 30~90%RH 結露なきこと  
輸送および保管環境温湿度 温度: -10~60℃  
湿度: 30~90%RH 結露なきこと  
防水仕様 IPX7※  
動作回数 満充電で約28回(1回2分、normalモードでの使用の場合)  
付属品 ノズル2個、ノズルヘッド2個  
充電用ケーブル1本、計量スプーン1個

※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。

