


このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

製造販売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL：https://www.dretec.co.jp


各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。


< 表面 >

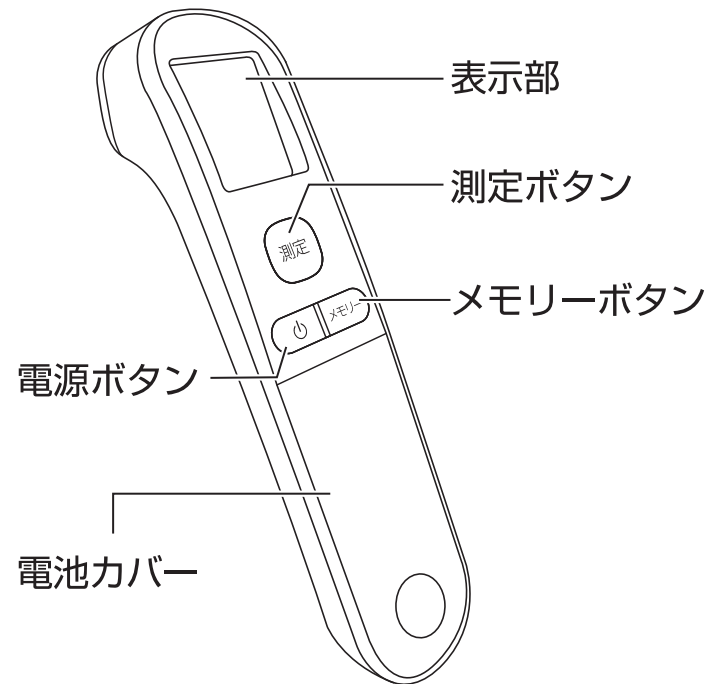

< 裏面 >

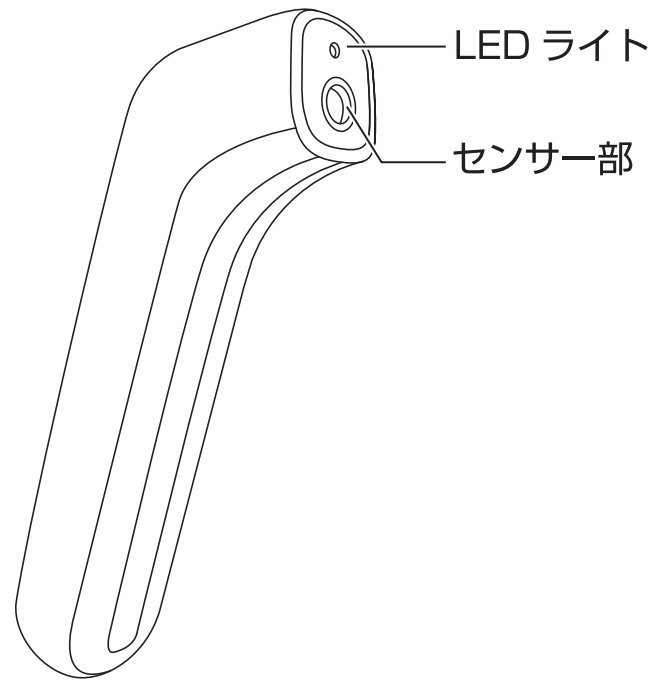

< 表示部 >

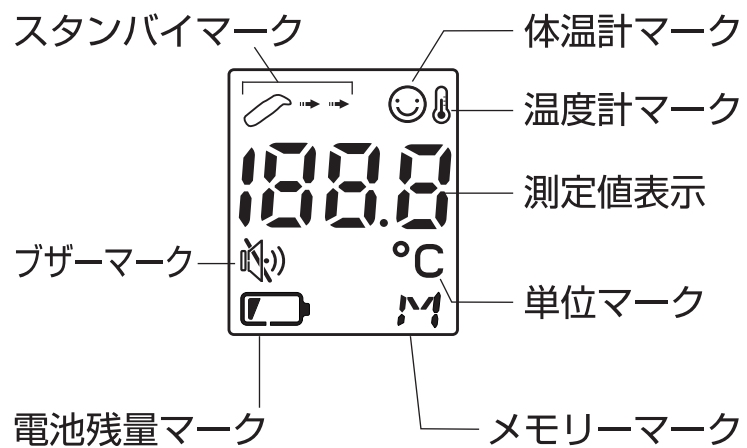

電池残量が少なくなってきました。 電池交換を推奨します。

電池交換の目安

電池残量がありません。
誤作動する場合があります。



ご使用上のお願い


- 体温測定・温度測定以外の目的に使用しないください。
- 体温測定中は激しく動かないでください。
- 測定する場合は、使用環境温度(5～40℃)に30分以上なじませてから使用してください。
- 起床、スポーツ、食事、外出、入浴などの直後は正しい測定ができません。
- 使用前にセンサー部が汚れていないことを確認してください。
- 電池残量マークが表示されたら、速やかに電池交換をしてください。
- センサーがあたる場所によって体温は若干異なります。一定の条件の下で何回か検温し、本製品での平熱を確認してください。
- 額からの距離は約3～5cm離してください。近すぎると高く、遠すぎると低く表示されます。
- 体調が以下のような場合は、正しく測定できない場合があります。興奮状態・肌が紅潮している・脈拍が速い・皮膚がかぶれている・虚脱症・血管収縮薬摂取時など
- 帰宅直後で体が冷えている場合、水枕・氷嚢などをあてた部位などは皮膚が温まってから測定をしてください。
- ヘアドライヤーを使用した場合、温風が直接あたっていると正しく測定できない場合があります。
- 汗や水分でぬれていたり、化粧をしていると測定値が低くなることがあります。

ご使用方法


■体温の測定

1. 「電源」ボタンを押す。

電源が入り、本体温度が表示されバックライトが点灯します。その後、単位マーク「℃」とスタンバイマーク「」が点滅し、体温測定モードになります。※体温測定モードでは表示部に体温計マーク「」が表示されます。

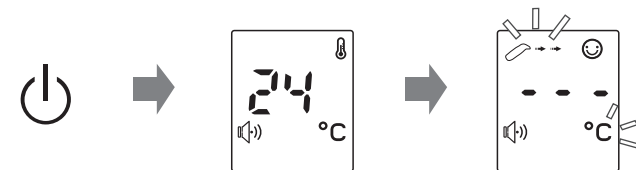

2. 約3～5cm離して額の中心にセンサー部を向け、「測定」ボタンを押す。(LEDライトが測定部を照らします) 表示部が点灯し、測定確認音が鳴ったら測定は終了です。電源ボタンを押して電源を切ってください。※センサー部と額を平行にして測定してください。※消音モードでは測定確認音が鳴りません。

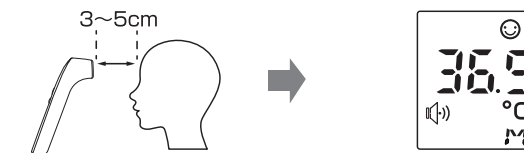

測定結果に応じて表示部の色が変わります。

33.9 以下	赤	Lo
34.0 ～ 37.4	緑	測定結果
37.5 ～ 38.1	オレンジ	測定結果
38.2 ～ 43.0	赤	測定結果
43.1 以上	赤	HI

※測定結果が37.5～43.0の場合は「ピピッ」と測定確認音が10回連続で鳴り、33.9以下と43.1以上の場合は「ピピピッ」と1回鳴ってお知らせします。

※測定後約30秒経過すると、自動的に電源が切れます。※測定結果が表示された後、再び単位マーク「℃」とスタンバイマーク「」が点滅したら続けて測定ができます。


■物体の表面温度の測定

1. 「電源」ボタンを約3秒長押しする。

電源が入り、本体温度が表示されバックライトが点灯します。その後、単位℃マーク「℃」とスタンバイマーク「」が点滅し、物体測定モードになります。※物体測定モードでは表示部に温度計マーク「」が表示されます。

2. 約3～5cm離して対象物にセンサー部を向け、「測定」ボタンを押す。(LEDライトが測定部を照らします) 表示部が点灯し、測定確認音が鳴ったら測定は終了です。電源ボタンを押して電源を切ってください。

※測定値は物体の表面温度となるため、容器の内容物の温度と異なる場合があります。※消音モードでは測定確認音が鳴りません。

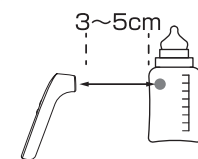

※測定後約30秒経過すると、自動的に電源が切れます。※測定結果が表示された後、再び単位マーク「℃」とスタンバイマーク「」が点滅したら続けて測定ができます。

メモリー機能

■メモリーの呼び出し

1. 電源が切れている状態で「メモリー」ボタンを押す。電源が入り、表示部に「1」とメモリーマーク「」が表示され、次に前回の測定結果が表示されます。※メモリーが全消去されている場合は「- - -」と表示され、バックライトが緑色に点灯します。



2. 「メモリー」ボタンを押す。表示部に「2」と表示され、次に前々回の測定結果が表示されます。※「メモリー」ボタンを押すごとに、測定結果が最大9回分さかのぼって表示されます。※約30秒操作しないと、自動的に電源が切れます。

■メモリーの全消去

1. 電源が切れている状態で「メモリー」ボタンを押す。電源が入り、表示部に「1」とメモリーマーク「」が表示され、次に前回値が表示されます。
2. 「電源」ボタンを約5秒長押しする。表示部に「- - -」と表示され測定履歴が消去されます。




電池交換


※使用電池：単4形アルカリ乾電池 ×2 個

※付属の電池は動作確認用電池ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1. 電池カバーの右図部分をカチッと音がするまで押すと少し浮くので取りはずす。

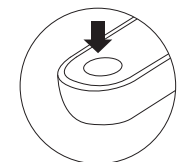

2. 電池を取り出し、新しい電池をセットする。※電池の極性(+-)を間違えないように入れてください。

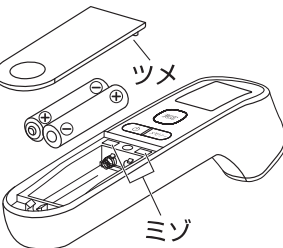

3. 電池カバーのツメをミゾに入れ、電池カバーを開けたときと同じようにカチッと音がするまで押して本体にセットする。

⚠ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

