




## 電池交換

- 本体にはあらかじめ動作確認用電池が内蔵されていますが、電池寿命が短い場合がございます。
- 電池の寿命が近づくと、測定開始時に表示部中央に「Lo」マークが点滅表示され、測定ができなくなります。
- 寿命と判断された電池はすみやかに新しい電池と交換してください。そのまま放置する事はおさけください。液漏れにより故障の原因になります。
- 使用済みの電池や本体の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従って廃棄処分してください。

## 交換のしかた

①電池カバーをはずします。

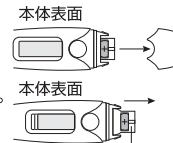

②本体中身を5mm程度引き出します。

△この時強く引っ張らないでください。  
破損する事があります。

△基盤には絶対に触れないでください。

③本体裏面側から精密マイナスドライバー等、先の細いもので電池を押し出すように取り出します。


△電池はきつめにセットされていますので取り出す際はつまようじ等で指を刺さないよう注意してください。

④本体中身を指で押さえ、電池のプラス面が表になるよう押しほみます。

⑤本体中身を元にもどし、電池カバーをしてください。

※電池カバーがかたくてはすりにくいときは、以下の方法をお試しください。先端の幅が3~5mmのマイナスドライバー1本をご用意ください。

1. すべりにくい机の上に体温計を電源ボタンを上にして置き、動かないように押さえる(図1)。

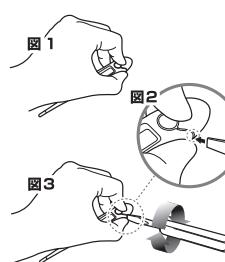

2. 人差し指で電池カバーの合わせ目部分を下に押さえつけた状態を保ち、側面の電池カバーと本体の隙間にマイナスドライバーを差し込む(図2)。

3. 2の状態を保ったまま、ドライバーを時計回りに回して電池カバーをはずしてください(図3)。

## 仕様

販売名	電子体温計 TO-102
認証番号	第 226AKBZX00012000 号
温度測定範囲	32.0°C~42.9°C 31.9°C以下で「Lo」マーク表示 43.0°C以上で「Hi」マーク表示
測定精度	±0.1°C (32.0°C~42.9°Cの間) 周囲温度10°C~40°Cの時
温度表示	3桁デジタル+°C表示、0.1°C毎
終了予告ブザー	温度上昇が0.1°C/32秒以下のとき鳴ります
測定値メモリー	最後の測定値を記憶保存します
電気保護	内部電源機器BF形
測温部	サーミスタ
使用電池	アルカリボタン電池 LR41×1個(DC1.5V)
使用温度条件	10°C~40°C
保管温度と湿度	-10°C~60°C 30%~90%RH
外形寸法と重量	140(H)×22(W)×12(D)mm 約13g(電池を含む)
電池寿命	約2年(新品電池を一日10分使用の場合)

## 故障かなと思ったら

●電源が入らない/表示部に「Lo」が表示される

原因	対処方法
電池が消耗しているか	新しい電池に交換してください。 「電池交換」をご参照ください。
電池の向きをまちがえていますか	電池を正しくセットし直してください。 「電池交換」をご参照ください。

●思ったより測定値が低い

原因	対処方法
汗をかいていませんか	汗をきれいにふき取って測定しなさい。
測温部を正しくあてていますか	「体温計の正しいあて方」をご参考ください。
測定時間が短かった可能性があります	終了予告ブザーが鳴った後も検温を続けてください。

●思ったより測定値が高い

原因	対処方法
測温部が何らかの理由で熱くなっている可能性があります	測温部を冷やし、電源を入れた時に「Lo」が表示されることを確認してください。 再度測定してください。

●測定値が一定していない、ばらつく

原因	対処方法
測定するたびに、検温部がある場所が変わっていますか	「体温計の正しいあて方」をご参考ください。
飲食・運動・入浴直後などに測定していますか	「正確な測定のために」をご参考ください。

●終了予告ブザーが測定開始後すぐに鳴る

原因	対処方法
測温部がずれた可能性があります	「体温計の正しいあて方」をご参考ください。

## お手入れと保管

体温計はいつも清潔にお手入れしてください。

●ご使用後は、柔らかい布や脱脂綿等に消毒用アルコールまたはぬるま湯をしみ込ませてかたく絞ったもので、測温部を軽く拭いてください。(電池カバー部と本体の間にしみ込ませないようご注意ください。)

●下記の事を守ってください。故障の原因になります。

- ・電池カバー部分は防水性がありません。丸洗いはしないでください。
- ・汚れを落とす際はシンナーやベンジンは使用しないでください。
- ・体温計の測温部を長時間アルコールに浸したり、熱湯(50°Cを超える湯)で消毒しないでください。
- ・丸洗いや超音波洗浄をしないでください。

体温計は、ケースに入れて保管してください。

- 保管する際は、本体を乾燥させた状態にして、下記のような場所には保管しないでください。
- ・水のかかる場所
- ・高温多湿の場所や直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所や、暖房器具のそば、塩分などを含んだ空気の影響を受ける場所
- ・傾斜、振動、衝撃のある場所
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する場所
- 長期間保管する場合は、電池を本体からはずしてください。

2014年2月24日

医療機器認証番号：第 226AKBZX00012000 号

## 機械器具(16) 体温計

管理医療機器 一般的名称：電子体温計(JMDN14032010)  
販売名：電子体温計 TO-102

8)電源ボタンを押さなかった場合、約9分後に自動的に電源OFFになる。

### 【使用上の注意】

- (1)小さなお子様の手の届かないところで保管してください。また、お子様にご使用の際は、先端の測温部で目を突いたり、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
- (2)運動・食事・入浴の後は十分な時間をおいてから体温を測定してください。
- (3)本体を強く噛まないでください。
- (4)体温以外の測定及び、人以外の検温に使用しないでください。
- (5)口腔(舌下)の体温を測定する場合は、ご使用前に消毒用アルコールを染み込ませた布などで測温部を拭き、清潔にご使用ください。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- (1)高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
- (2)収納ケースへ収納し、保管してください。

### 【取り扱い上の注意】

- (1)分解・改造・修理は絶対行わないでください。
- (2)電池カバー部分は防水性がありません。電池カバー部分に水等をかけたり、本体に水等をつけたりしないでください。
- (3)熱湯消毒はしないでください。
- (4)丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
- (5)極端に曲げたり落としたり強い衝撃を与えないでください。
- (6)体温を測定する時、周囲温度が体温より高いような場合は測温部に水をかけ、測温部を冷やしてから測定し、終了のお知らせ音が鳴ったらすぐ表示値を読み取ってください。
- (7)電池が消耗した場合、表示部の中央に電池低圧マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。
- (8)電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。

### 【保守・点検に関わる事項】

- (1)使用前に清潔な状態にし、作動するか(電源が入るか)を確認してからご使用ください。
- (2)汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

### 【包装】

本体・収納ケース1台/個

### 【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ドリテック  
埼玉県越谷市流通団地2-3-9  
製造元：VEGA TECHNOLOGIES INC.(中国)  
東莞東冠電子製品有限公司

### 連絡先

株式会社ドリテック お客様相談センター  
フリーコール 0120-875-019  
受付時間：月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00  
(祝祭日および当社指定休日を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。