



ボディースケール「ピエトラ イーティアーナル」
BS-167

家庭用

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00、祝祭日および当社指定休日を除く)

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 取り扱い上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体

保証条件：持込修理

保証期間：お買上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店へご相談ください。

保証書

お買上げ年月日

お買上げ店


お名前

ご住所

お電話番号

各部の名称

- A：表示部
B：本体（測定台）
C：電池カバー（裏側）
- 付属品
・取扱説明書（本書）
・動作確認用電池（単4形乾電池×3個）
※本体にセットされています。

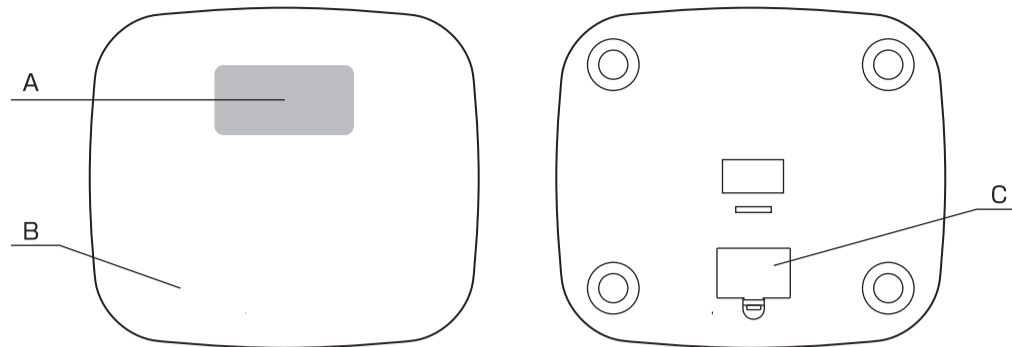

製品特長

- のると自動で測定開始…のるだけで体重の測定を開始します。
- 軽量ボディ…持ち運びに便利な軽量ボディ。(約640g(電池重量を含む))
- 最小表示50g…5kgから100kgまで50g単位で、100kgから150kgまで100g単位で測定。
- ホールド機能(表示固定方式)…体重計にのって身体を安定させてから約3秒経つと、表示している測定値を固定します。
- オートパワーオフ機能…測定値表示固定後、約10秒で電源が自動的に切れます。
- ローバッテリー表示…電池が消耗すると測定台にのったとき、表示部に「Lo」と表示され、電源が自動的に切れます。

表示方法

- 測定値は図のように表示されます。（図1参照）

図1 52.50kgの表示



ご使用場所について

- 平らな硬い床などでご使用ください。
- 畳やじゅうたん等のやわらかい場所の上ではかた場合は正確な測定ができませんので、使用する場合は平らな硬いプレートなどを下に敷いてから測定してください。

警告

体重計の端にのったり、勢いよくのると転倒して大けかをされるおそれがあります。必ず静かにのりおりにしてください。

初期設定

本製品には初期設定機能があります。初期設定とは平らな面上で本体に何も物がのっていない状態を0.00kgと認識するための設定です。したがって初めてお使いになるとき、電池交換をしたとき、本体を移動したときや置き方を変えたときは必ず下記の手順で初期設定を行ってください。


- 初期設定方法
平らな硬い床に本製品を設置します。測定台を足で踏み、表示が出たら足を離します。約10秒後0.00の表示が消えると初期設定は終了です。

ご使用方法

※ 初めてお使いになるときは、本体裏側の電池カバーを取りはずし、絶縁シートを取り除いて（図2参照）上記初期設定を行ってからご使用ください。

- 1) 測定台に静かにのってください。
- 2) 測定値が2回点滅し、kgが表示されると測定終了です。（図1参照）
- ※ 測定が終了するまで、直立したまま極力動かずに安定した状態を保ってください。
- 3) 測定値固定後、約10秒間測定値を表示し、その後電源が自動的に切れます。
- ※ 測定開始から表示が安定しない場合、約10秒で電源が自動的に切れます。

図2

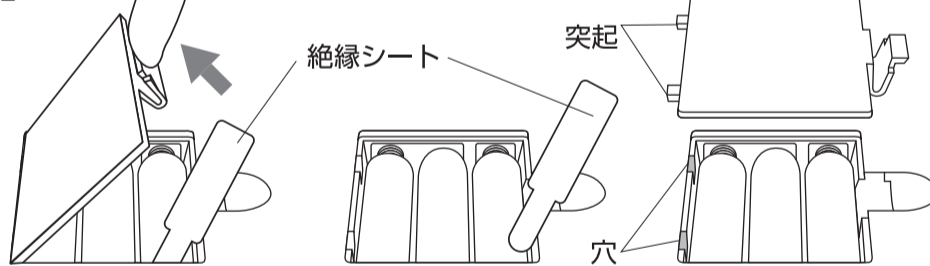

●お手入れのしかた

- ・水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸して、拭いてください。その際は布を固く絞り、拭いた後にさらに乾いた柔らかい布で、残った水分を拭き取ってください。
- ・ベンジンやシンナー、中性洗剤以外の洗剤は使用しないでください。また、熱湯の使用も避けてください。
- ・水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

電池交換（使用電池：単4形乾電池×3個）

電池が消耗すると測定台にのったとき表示部に「Lo」と表示され、電源が自動的に切れますので、3個とも新しい電池と交換してください。

- 1) 裏側の電池カバーを取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取ります。このときマイナスドライバー等の先が尖ったものを使うと簡単に取り出すことができます。（図3参照）
※新しい電池の極性（+・-）を間違えないように入れてください。
- 3) 電池カバーの2つの突起を電池ボックスの穴に合わせ、パチッと音がするまで押し込んで閉じます。（図3参照）
※新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂などを起こし、ケガをするおそれがあります。
※付属の電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。
※ニッケル水素充電電池は使用できません。

図3

