

# DRETEC

## Analog Body Scale Shapes

アナログ体重計「シェイプス」

### BS-302

最大計量120kg 目量1kg

家庭用

### 取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただけますようお願い申し上げます。なお、この説明書は手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

輸入元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

☎0120-875-019

(月～金10:00～12:00, 13:00～16:00)

祝祭日および当社指定休日を除くを除く)

<http://www.dretec.co.jp>

### 安全上のご注意



この表示の項目について、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。


- 病院や診療所など業務用では使用しないでください。業務用としての機能は備えておりません。
- 濡れた床や滑りやすい材質の床(タイル面など)では使用しないでください。転倒したり、滑ったりして大けがをするおそれがあります。
- 本製品に飛びのったり、本製品の上で飛び跳ねたりしないでください。転倒して大けがをするおそれがあります。
- 体の不自由な方がのときは、介助者に援助してもらおうか、手すりなどを利用してください。
- 本製品の端にのると、バランスが悪く転倒して大けがをするおそれがあります。



この表示の項目について、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定されることを示しています。

- 本製品は平らな安定した場所に設置してください。不安定な場所では転倒の危険がありますので使用しないでください。
- 入浴後など濡れた体で本製品にのらないでください。転倒して大けがをするおそれがあります。また、本体が濡れると故障の原因になります。
- 持ち運びには注意してください。特にお子様などには持ち運びをさせないでください。落として大けがをするおそれがあります。
- 本製品のすき間に指などを入れないでください。けがをするおそれがあります。
- 高温になる場所に置かないでください。機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。また、ストーブなどの加熱器具の近くや直射日光の当たるところには放置しないでください。
- 湿気や磁気の多い場所に置かないでください。故障の原因になります。
- 揮発性溶剤がある場所では使用しないでください。本製品の部品に変色、変形のおそれがあります。
- 加熱、分解、改造、水中での使用はしないでください。故障の原因になります。

### 各部の名称

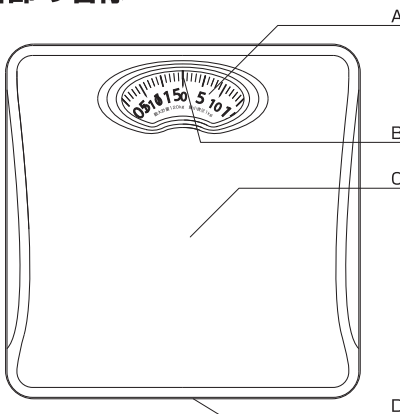

A:表示部

B:指針

C:本体(測定台)

D:0kg調整ダイヤル

### 製品仕様

品番	BS-302
本体寸法	幅250×奥行250×高さ45 mm
本体重量	1180g
計量範囲	5～120kg
最小表示	1kg

### ご使用について

- 平らな硬い床などでご使用ください。
- 畳やじゅうたん等のやわらかい場所の上で、はかった場合は正確な測定ができませんので、使用する場合は平らな硬いプレートなどを下に敷いてから測定してください。
- ご使用前に0kg調整ダイヤルを回して指針に0kgを合わせてください。

(使用場所の温度20℃±5℃の場合)

はかる重さ	精度
5～60kg以下	±1.6kg
60kg越え120kg以下	±2.4kg

※0～5kgは精度保証範囲外になります。

- 本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

### 精度を保つためには

● 本製品は精密に作られています。良い状態を保つために次のことをよく守ってご使用ください。

使用する場所と保管する場所

- 1) 直射日光の当たるところや暖房器具などの熱風が直接当たるところには置かないでください。
- 2) 温度変化の激しいところでの使用は避けてください。
- 3) 湿気の特に多い場所や水気のある場所には置かないでください。
- 4) 振動の激しいところに保管しないでください。
- 5) 上に物をのせたまま保管しないでください。

### 保証規定

● 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。

- ※ 誤ったご使用、不注意、分解、不当な修理、改造、天災、地震等による故障または損傷。
- ※ ご使用上には生じる外観の変化。
- ※ お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様ににて負担願います。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前にご同意をいただくことなく、上記目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。1年を越える場合は有償にて承ります。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

### 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品:本体

保証条件:持込修理

保証期間:お買い上げ日より1年以内

お名前 ご住所
お電話番号

お買い上げ年月日 お買い上げ店