

安裝應用程式

○有兩種安裝方法。

① 使用下面的二維碼或 URL 在智慧型手機上安裝「dretec life」應用程式。



https://www.dretec.co.jp/support/dretec_life_apps

②在應用程式商店中搜尋「dretec life」並安裝該應用程式。




啟動應用程式



「dretec life」應用程式安裝完成後，點擊左側顯示的圖示以啟動該應用程式。

※ 此應用程式使用網路通訊和藍牙通訊。在無線電波良好的地方使用它，並在與設備通訊時啟用智慧型手機上的“藍牙”設定。

建立一個帳戶

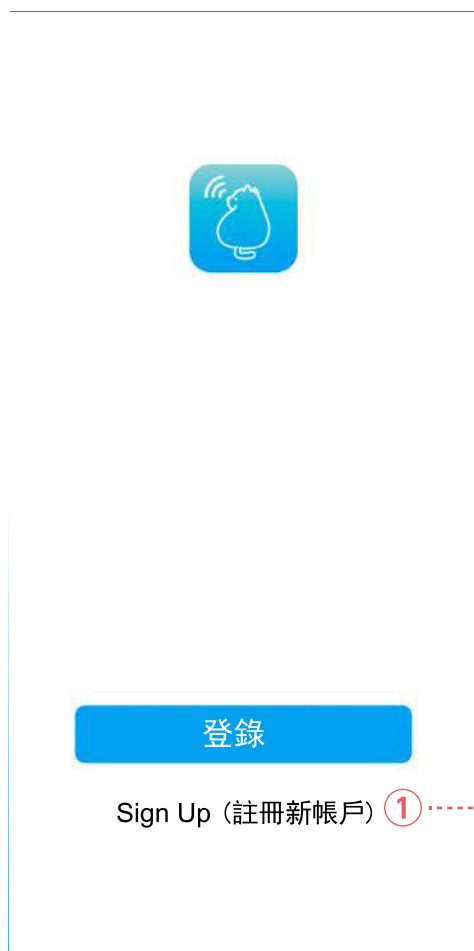

① 點選【Sign Up】。

註冊新帳戶

日本

メールアドレス

☐ 以下に同意します：[プライバシーポリシー](#) 及び [ユーザー規約](#)

認証コードの取得

② [國家/地區]，選擇「香港」。

③ 輸入您的電子郵件地址。
※ 請輸入可以接收電子郵件的電子郵件地址。

④ 檢查[隱私權政策]和[使用者使用條款]後，如果同意，請點選核取方塊。
※ 如果您不勾選此框，您將無法註冊。

⑤ 點選【Get Verification Code】。(取得驗證碼)
※ 如果您輸入您的電子郵件地址並點擊複選框，您將能夠點擊[獲取驗證碼]按鈕。

<

輸入驗證碼

|

Eメールに認証コードが送信されました:
hajiy5633@yahoo.co.jp 再送信 (58s)

[認証コードが届いていませんか?](#)

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ

0

⌫

○一封包含 6 位驗證碼的電子郵件將會傳送到您輸入的電子郵件地址。

⑥檢查並輸入您收到的驗證碼。

※如果電子郵件沒有到達

- ・電子郵件地址不正確
- ・在垃圾郵件資料夾中
- ・如果您的電子郵件應用程式有封鎖功能，可能會阻止接收此郵件

請檢查以上問題並重新提交。

如果您輸入的驗證碼正確，將顯示下列畫面。

<

設定密碼

パスワード

アルファベットと数字を含む6～20桁

完了

○設定密碼。

⑦輸入任意密碼。

※密碼包括字母和數字，必須在 6 到 20 位內。

⑧點擊[完成]。

主螢幕 每個圖示的說明



○建立帳戶並登入後，將顯示「我的主頁」畫面。

（主畫面）

①將dretec life相容裝置連接至dretec life應用程式並添加設備。

點選螢幕中央的[添加設備]或螢幕右上角的[+]進行添加設備。

②顯示帳戶資訊畫面。

您可以設定個人資料圖片和暱稱。

③顯示[個人資料]。

如何註冊您的設備


○為了使用您購買的 dretec life 相容設備在應用程式中記錄測量結果，請在應用程式中註冊該設備。

※註冊設備時，需要保持設備電量直到註冊完成。根據設備的不同，電源可能會透過「自動關機」自動關閉。

請在確保設備有足夠電量，以免設備在註冊過程中關閉。


○這裡以註冊身體監測儀（產品編號：BS-404）為例進行介紹。

※ Dretec life 相容設備將依序新增。

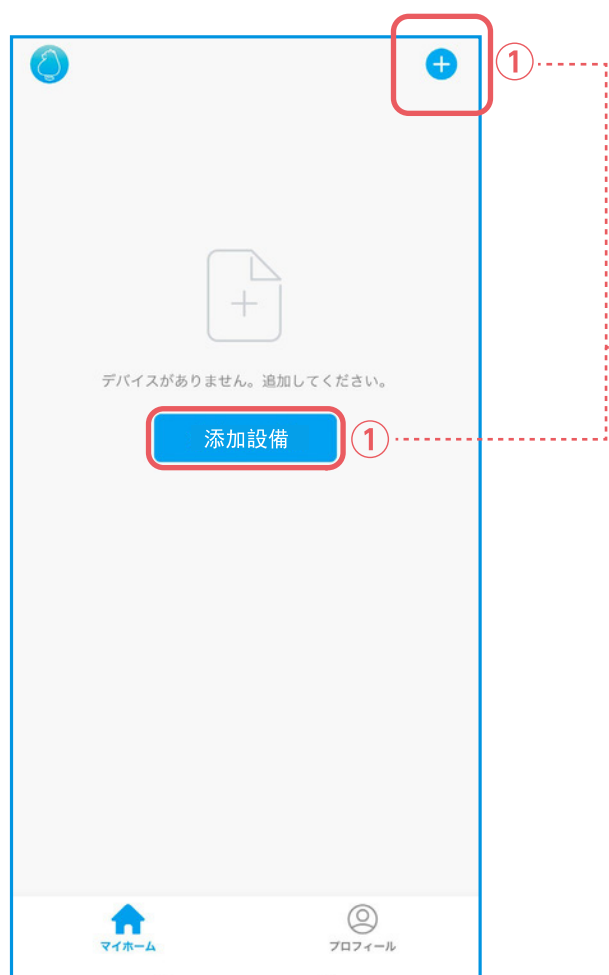


○顯示我的主畫面。


① 點選我的家主頁中的[添加設備]或點選 [+] 按鈕。
打開設備 身體監測儀（產品編號：BS-404）的電源。

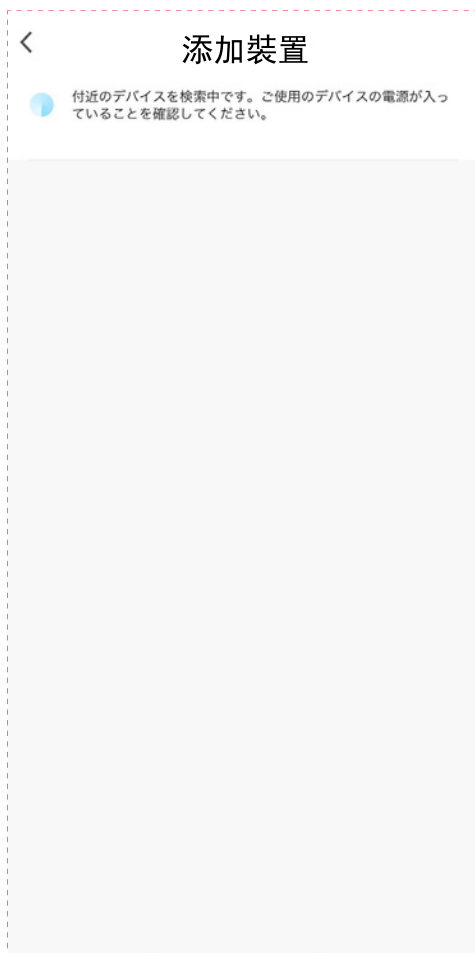


搜尋智慧型手機附近的 dretec life 相容設備。
※根據搜尋結果，將顯示不同的螢幕。

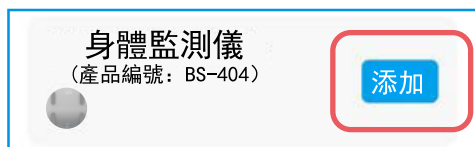


○ 如果在附近發現可以註冊的設備
① 點擊 [添加]。

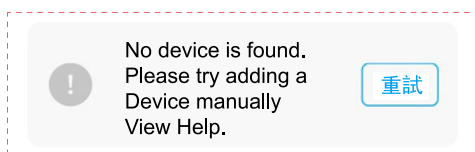

○如果找不到設備
① 確保設備已通電。此外，如果智慧型手機和設備之間有障礙物，或在附近使用微波爐等發射無線電波的設備，連接可能會變得不穩定。請確保設備已開啟並且智慧型手機和設備之間沒有障礙物，然後再次嘗試添加設備。

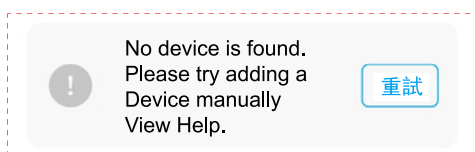


② 智慧型手機本身的藍牙設定已關閉，或 dretec life 應用程式不允許使用藍牙。啟動智慧型手機上的設定應用程式並檢查 dretec life 的權限設定。

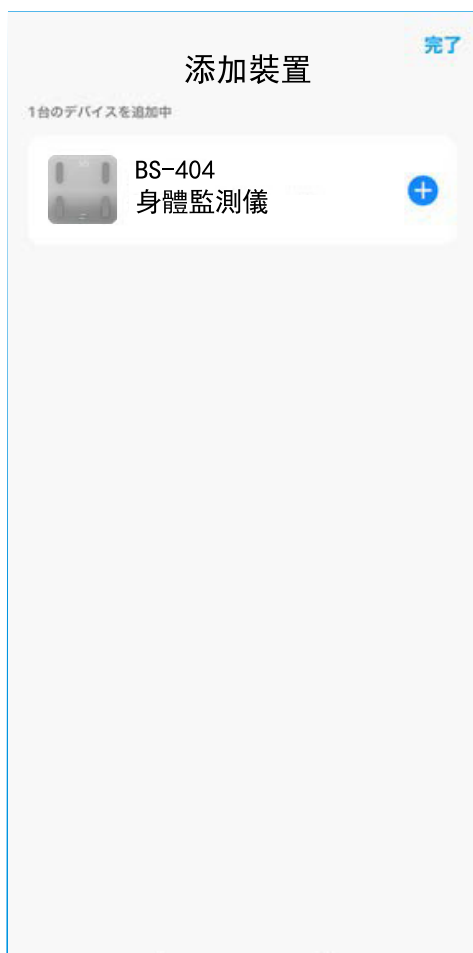

①

點選 [+] 按鈕開始註冊設備。註冊完成之前請不要關閉設備

點選 [+] 請注意，如果您點擊右上角的[完成]而不點擊[+] 按鈕， 您將返回主畫面而不新增裝置。

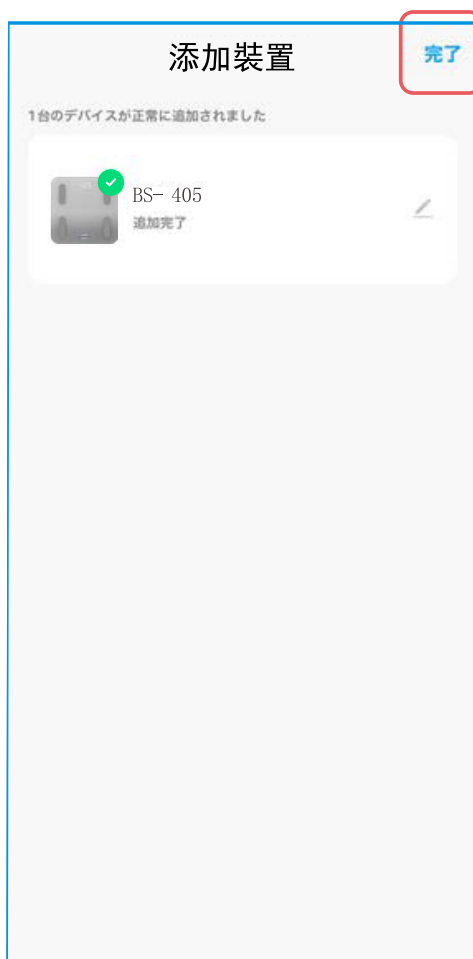

②

○當圖示畫面上出現綠色  選標記時，設備註冊完成。

②點選[完成]，顯示使用者資訊輸入畫面。請正確輸入您的 暱稱、性別、身高、出生日期等。輸入使用者資訊後，將顯示已註冊設備的測量螢幕，您可以記錄測量結果。

※ 設備註冊可能會因註冊過程中設備關閉或通訊狀態不穩定等原因而無法完成。此時，請檢查通訊環境，重新啟動應用程序，然後重新啟動裝置。



設備註冊完成後，註冊的設備將顯示在我的主螢幕上。

下次開始，點擊您想要使用的設備顯示測量螢幕， 打開設備，設備和應用程式將自動連接。